
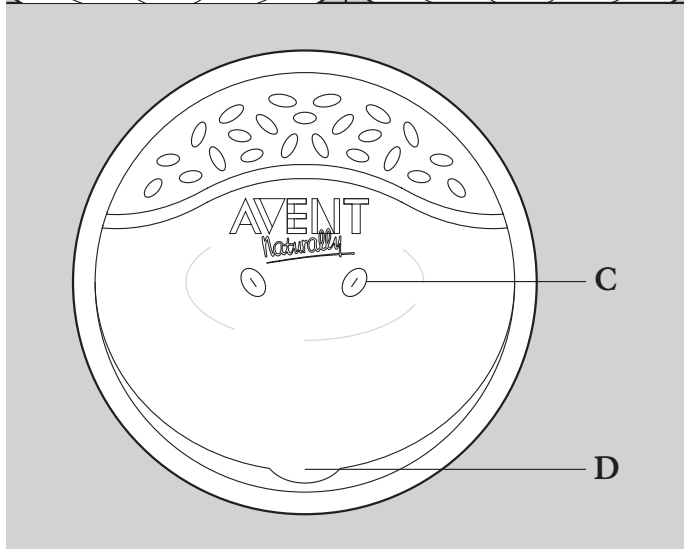


AVENT
Naturally

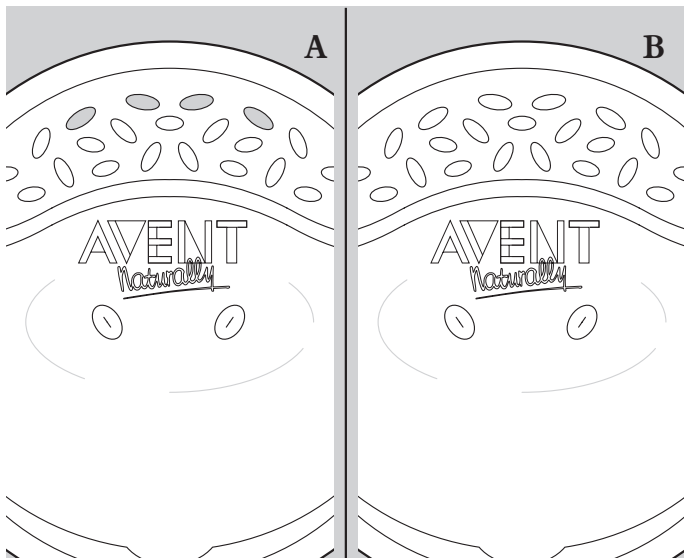

Coquilles Confort ISIS AVENT

avec coussins doublure ultradoux

Contenu: 2 Coquilles Perforées, 2 Coquilles Recueil-Lait (NON-PERFORÉES) et 2 Coussins Doublure Souple

- A. **Coquilles perforées** – pour protéger les mamelons gerçés ou crevassés
- B. **Coquilles Recueil** – pour recueillir les fuites de lait
- C. **Pieds de stabilité** – pour poser sur une surface plane
- D. **Bec verseur** – pour vider sans pertes.

Les Coquilles Confort ISIS AVENT se portent dans le soutien-gorge pour vous aider à parer aux problèmes couramment rencontrés pendant l'allaitement au sein.

Pour protéger les mamelons douloureux ou crevassés et aider à soulager les seins engorgés

- ◆ Attachez les coussins doublure aux coquilles perforées et glissez-les dans votre soutien-gorge. Les coussins souples épouseront la forme de vos seins et les coquilles bombées protégeront vos mamelons sensibilisés contre les gerçures. Les perforations laisseront l'air circuler pour aider la cicatrisation.
- ◆ Les coquilles perforées servent aussi à soulager les seins engorgés. Elles exercent une légère pression au niveau de l'aréole et laissent s'échapper des gouttes de lait. **NE DONNEZ PAS** ce lait à votre bébé: du lait recueilli si lentement peut contenir des microbes.

Pour recueillir du lait à conserver

- ◆ Stérilisez les coquilles non-perforées et les coussins doublure en silicone soit dans un stérilisateur AVENT (électrique ou pour micro-ondes), soit par ébullition pendant au moins 10 minutes.
- ◆ Attachez les coussins doublure aux coquilles non-perforées. Glissez une coquille recueil-lait doublée dans votre soutien-gorge pour recueillir le lait qui coule d'un sein pendant que vous allaitez ou que vous utilisez le tire-lait sur l'autre sein. Seul le lait recueilli pendant que vous allaitez ou que vous utilisez le tire-lait peut être conservé pour sa consommation ultérieure.
- ◆ Pour vider la coquille, enlevez doucement la doublure en silicone et versez le lait dans un biberon stérilisé ou dans un sachet pré-stérilisé jetable. Réfrigérez ou congelez dès que possible après le recueil. Le lait maternel se conserve 24 heures au réfrigérateur ou 3 mois au congélateur.
- ◆ Lavez soigneusement toutes les pièces après utilisation.

NB: Il est recommandé de ne pas porter les coquilles plus de 40 minutes à chaque fois pour éviter une pression exagérée sur les galactophores.



Tire-lait ISIS



Protège-mamelons Tendresse

Autres accessoires d'allaitement AVENT

- ◆ Pour soulager les seins engorgés juste avant d'allaiter, vous pouvez aussi utiliser le **tire-lait AVENT ISIS** pour tirer un peu de lait et assouplir le sein, permettant ainsi à votre bébé de prendre le mamelon plus facilement
- ◆ Pour pouvoir continuer à allaiter sans douleur même quand vos mamelons sont sensibles, voire crevassés, utilisez les **protège-mamelons TENDRESSE AVENT**. Leur silicone douce, inodore, ultrafine, protègent vos mamelons; leur découpe anatomique laisse à bébé tous ses repères toucher/odeur/goût.
- ◆ Si vous avez les mamelons plats ou ombiliqués, utilisez la **Niplette AVENT** quelques minutes juste avant la mise au sein, pour faire sortir votre mamelon et permettre à bébé de le saisir. La Niplette AVENT s'utilise aussi après le sevrage, pour la correction permanente de telles rétractions.

Pour tous renseignements sur la gamme complète de produits AVENT pour l'allaitement au sein, l'allaitement mixte, ou l'allaitement au biberon:

Numéro Vert: 0800 90 81 54

E-mail: france@canonavent.com

Adresse postale: AVENT France, Glemsford, Suffolk, CO10 7QS, Angleterre.

Site internet: www.aventbaby.com